


Augsburg  
Bad Driburg  
Bayreuth  
Gießen  
Hamburg  
Heilbronn  
Kassel  
Kiel  
Klipphausen  
München  
Nürnberg  
Regensburg

Morellstraße 33  
Hinter dem Rosenberge 1  
Wilhelm-Pitz-Str. 1  
Schiffenberger Weg 76  
Holzmühlenstr. 86  
Sülmer Str. 60  
Druseltalstr. 61  
Schönkirchener Str. 78  
Bremer Str. 9  
Hofer Str. 15  
Deutschherrnstr. 15-19  
Bahnhofstr. 13

86159 Augsburg  
33014 Bad Driburg  
95448 Bayreuth  
35394 Gießen  
22041 Hamburg  
74072 Heilbronn  
34131 Kassel  
24149 Kiel  
01665 Klipphausen  
81737 München  
90429 Nürnberg  
93047 Regensburg

Tel. 0821 2590717  
Tel. 05253 970513  
Tel. 0921 50720450  
Tel. 0641 77044  
Tel. 040 60038760  
Tel. 07131 203750  
Tel. 0561 91880  
Tel. 0431 218380  
Tel. 035204 6350  
Tel. 089 6302380  
Tel. 0911 944700  
Tel. 0941 53710

Fax 0821 2590989  
Fax 05253 970514  
Fax 0921 507204545  
Fax 0641 13022  
Fax 040 600387622  
Fax 07131 163911  
Fax 0561 9188199  
Fax 0431 2183842  
Fax 035204 63555  
Fax 089 6731836  
Fax 0911 9447041  
Fax 0941 53708

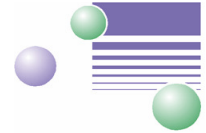

## TESTANLEITUNG ZUR VATERSCHAFTSANALYSE

Wir benötigen zur Vaterschaftsanalyse von jeder Testperson drei Mundschleimhautabstriche oder ein Röhrchen EDTA-Blut. Bitte zügig ungekühlt zuschicken.

### Mundschleimhautabstrich:

#### VOR ENTNAHME DES ABSTRICHS BITTE BEACHTEN:

- Eine Stunde vor dem Test sollen die Testpersonen nichts essen oder trinken.
- Bitte nehmen Sie vor dem Test keine Mundhygiene z.B. in Form von Zähneputzen vor, sondern spülen den Mund nur kurz mit Leitungswasser aus.
- Säuglinge sollen mindestens eine Stunde vor dem Test nicht gestillt werden, damit sich in der Mundhöhle keine mütterlichen Zellen befinden.

#### ENTNAHME DES ABSTRICHS:

- Bitte beschriften Sie pro Testperson die Röhrchen mit Name, Vorname und Geburtsdatum der Probanden.
- **Die Wattestäbchen dürfen beim Herausnehmen aus den Röhrchen/Hüllen keinesfalls berührt werden!**
- Mit den Wattestäbchen an der Backeninnenseite des Probanden 5x auf und abfahren und dabei das Stäbchen um sich selbst drehen. Bitte drücken Sie das Wattestäbchen so fest an der Backeninnenseite auf, dass dies von außen sichtbar ist.
- Bitte lassen Sie das Probenmaterial kurz an der Luft antrocknen und verbringen das/die Wattestäbchen anschließend wieder in die Röhrchen.

⇒ Zur **Identitätssicherung** wird bei Erwachsenen ein gültiger Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) bzw. bei Kindern der Kinderausweis oder die Geburtsurkunde eingesehen und die Daten in beigefügte Niederschrift eingetragen (hierbei alle Vornamen aufschreiben und wenn möglich auch eine Kopie von Ausweis/Geburtsurkunde beilegen). Falls die Möglichkeit besteht, sollte auch ein Foto angefertigt werden mit der Unterschrift der jeweiligen Person(en). Bitte vergewissern Sie sich, dass das Formular für den Identitätsnachweis vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist.

**Um eine Manipulation der Proben auszuschließen, müssen die Proben in jedem Falle direkt von der Arztpraxis/Gesundheitsamt aus zu uns geschickt werden und dürfen keinesfalls den zu untersuchenden Personen zum Versand übergeben werden.**